

Papiertray Herstellprozess

1



Das Stellen der Medikamente wird in dem dafür gesondert bereitgestellten „Versiegeltray“ vorgenommen.

2



Die Versiegelung in dem „Versiegeltray“ wie üblich durchführen.

3



Auf keinen Fall im Papiertray versiegeln!

4




Die OneClick-Einrasthilfe gemeinsam mit dem mitgelieferten Plexiglas-Einsatz vorbereiten.

5



Den leeren Papiertray auf den Plexiglas-Einsatz aufsetzen.

6

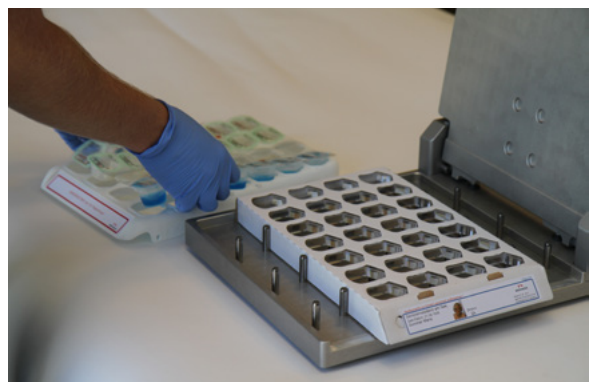

Die versiegelten Becherreihen als eine Einheit aus dem Versiegeltray in den leeren Papiertray einsetzen.

Papiertray Versiegelprozess

7



Die versiegelten Becherreihen lose in den leeren Papiertray einsetzen.

8



Mit der Einrasthilfe die Becher in den Papiertray einrasten. Es kann teilweise ein „Click“ Geräusch beim festen Eindrücken entstehen.

9



Wenn die Becherreihen fest im Tray sitzen, ist der Papiertray fertig zur Auslieferung.

10



Der Versiegeltray wird für die nächste Versiegelung wiederverwendet.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.